

ПРОФИЛАКТИКА

Всё для профессиональной гигиены,
бережного отбеливания и реминерализации



ВЛАДМИВА

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ЗУБОВ!

Профилактика в стоматологии играет бесконечно важную роль.

От состояния полости рта и зубов зависит здоровье всего организма. Безобидный, на первый взгляд, кариес может стать причиной заболеваний не только пищеварительного тракта, но и других важнейших органов и систем организма.

Основной целью профилактики является устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариес зубов и болезни пародонта) среди населения России достаточно высока.

Самым эффективным и, в то же время, простым способом профилактики стоматологических заболеваний является ежедневный гигиенический режим ухода за полостью рта, включающий чистку зубов, флоссинг, полоскание с использованием ополаскивателей с антибактериальными активными компонентами. Однако гигиенические процедуры этим не ограничиваются. Профилактика заболеваний полости рта (или гигиена полости рта) представляет собой комплекс мероприятий, который включает в себя не только каждодневную чистку зубов, но и регулярное посещение стоматолога.

Таким образом, для улучшения стоматологического здоровья необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Каждый человек должен понимать, что заботиться о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей внешности!





ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

4-е ИЗДАНИЕ

г. Белгород - 2025/1 (11)

УДК 616.314-72
ББК 56.61
П84

П84 Профилактические материалы / ВЛАДМИВА. – Белгород:
ВЛАДМИВА, 2023. – 28 с.: ил., цв. ил.

Авторы: Посохова В.Ф., Лыкова И.В., Лягина Л.А., Чуев В.П.,
Поздняков С.Н.

В каталоге представлены материалы для профилактики стоматологических заболеваний: индикаторы зубного налета, полирующие пасты, фторсодержащие и реминерализирующие гели, жидкости и лаки, а также современные средства для отбеливания зубов, которые могут быть использованы как на стоматологическом приеме, так и в домашних условиях. Изложена их краткая характеристика и основные формы выпуска.

Издание предназначено для информирования потенциальных потребителей изделий медицинского назначения — врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов медицинских вузов а также менеджеров торговых представителей компании «ВЛАДМИВА».



СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Аэр - Клинз - порошок	4
Аэр - Клинз - суспензия.....	7
Белагель – Р	8
БелСол №1	8
БелСол №2.....	9
Колор – тест	11
Полидент	12

СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Десенсил	13
Десенсил – Актив	13

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Белагель – О	14
Белагель – О актив	15
Белагель – О лайт	16
Белагель – О вайт	17

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ФТОРИРОВАНИЯ

Белагель – Са/Р	18
Белагель – F	20
Белак – F	21
Глуфторэд	22
Нанофлюор	23

СЕРЕБРЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Аргенат	24
---------------	----

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ФИССУР

Фиссхим ..	26
Фиссулайт	27

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

КолорДент.....	29
КолорДент – LC	30



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ МЕТОДОМ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

АЭР-КЛИНЗ®



Порошки «Аэр-Клинз» применяются по методу пескоструйной обработки. Под действием струи воды и сжатого воздуха порошок эффективно очищает твердые ткани, возвращая зубам естественный цвет и здоровый блеск.

«Аэр-Клинз» выпускается в виде порошков двух типов, различных по назначению:

«ПРОФ», «СОФТ», «ПЕРИО», «ПЛЮС» - для профилактической обработки;

«ПРЕП» - для препарирования полостей.


«АЭР-КЛИНЗ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРОФ» (на основе соды)

- профилактическая очистка;
- восстановление естественного цвета и полирование поверхностей зубов;
- удаление налета и мягких зубных отложений;
- удаление пигментаций и цветных пятен;
- очистка фиссур перед герметизацией.

ПРОФ 65 мкм

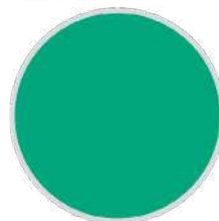

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


«Аэр-Клинз»-ПРОФ в качестве основного действующего компонента содержит **гидрокарбонат натрия** со средним размером частиц 65 мкм, позволяющим провести очистку при щадящем воздействии на твердые ткани зуба. Порошок имеет сладкий вкус (содержит подсластитель) и приятный освежающий аромат **лимона, мяты, черной смородины, тропикана, вишни, крем брюле, тутти-фрутти, мультифрукт, лесных ягод, дыни или апельсина.**

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-СОФТ» (на основе глицина)

- удаление незначительного мягкого наддесневого налета;
- поддесневая полировка;
- мягкая полировка (полирование поверхности зуба после удаления зубного камня);
- регулярная чистка зубов у пациентов с чувствительным пародонтом;
- удаление зубного налета и биопленки вокруг брекетов.

СОФТ 65 мкм

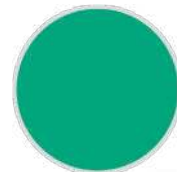

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-СОФТ изготовлен на основе глицина (**средний размер частиц 65 мкм**), имеющего мягкие абразивные свойства и приятный сладкий вкус без добавления подсластителя. «Аэр-Клинз»-СОФТ это лучшее решение для регулярных профилактических мероприятий и повторных посещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПЕРИО» (на основе глицина)

- обработка десневых карманов и поддесневая полировка;
- удаление зубного налета;
- удаление налета и биопленки вокруг имплантатов;
- щадящая чистка молочных зубов и полирование зубов у детей.

ПЕРИО 25 мкм



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПЕРИО изготовлен на основе глицина (**средний размер частиц 25 мкм**), имеющего мягкие абразивные свойства и приятный сладкий вкус без добавления подсластителя. Размер частиц глицина гарантирует щадящее воздействие на поверхность мягких тканей зубов, эмали, дентина, пломб, имплантатов и на поверхность молочных зубов у детей.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз»-ПЛЮС

- удаление биопленки, слабоминерализованных зубных отложений, пигментированного налета и пятен
- чистка фиссур перед герметизацией, дентальных имплантатов, композитных реставраций и несъемных ортопедических конструкций методом пескоструйной обработки.

Плюс 14 мкм



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Средний размер частиц около 14 мкм. Материал имеет приятный сладковатый вкус, подходит для чистки языка и мягких тканей с целью предупреждения галитоза, не содержит ароматизаторов. Материал эффективно удаляет биопленку со всех видов поверхностей (эмали, дентина, мягких тканей, композитных реставраций, ортодонтических конструкций и поверхностей дентальных имплантатов) с использованием аппарата Air-flow Prophylaxis Master, не повреждая при этом мягкие и твердые ткани, а также бережно удаляет налет с наддесневых и поддесневых поверхностей зубов.



ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВ АЭР-КЛИНЗ®



ЛИМОН, МЯТА,
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ
(ТРОПИКАНА) ВИШНЯ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Аромат		ЛИМОН, МЯТА, ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ (ТРОПИКАНА) ВИШНЯ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Состав		БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	ГЛИЦИН	ГЛИЦИН	
Размер частицы		65 МКМ	65 МКМ	25 МКМ	14 МКМ
рН		8,1	6	6	6
Зуб	Пигментированный налёт и слабоминерализованные зубные отложения	✓	✓	✗	✓
	Эмаль	✓	✓	✓	✓
	Пятна эмали	✗	✗	✓	✓
	Дентин	✗	✗	✓	✓
Мягкие ткани	Десны	✗	✗	✓	✓
	Язык и нёбо	✗	✗	✓	✓
Пломба	Гибридный композит	✗	✓	✓	✓
	Стеклоиономер	✗	✗	✓	✓
Имплантат	Ткани периимплантатов	✗	✗	✓	✓
Ортодонтические конструкции	Брекеты и скобки	✗	✗	✓	✓

Над цементно-эмалевым соединением		✓	✓	✗	✓
Поддесневые поверхности		✗	✗	✓	✓
Вокруг имплантатов		✗	✗	✓	✓

АИР-ФЛОУ ПРОФ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
АИР-ФЛОУ СОФТ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
АИР-ФЛОУ ПЕРИО	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
АИР-ФЛОУ ПЛЮС	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗



ДО ЧИСТКИ



ПОСЛЕ ЧИСТКИ

«АЭР-КЛИНЗ» ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ:

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРЕП» (на основе оксида алюминия - 29 мкм)

ПРЕП 29 мкм

- препарирование некариозных поражений зуба и кариозных полостей, в том числе в области шейки зуба перед пломбированием;
- финишная обработка кариозных полостей различных локализаций после обработки бором или «Аэр-Клинз»-Преп (45 мкм);
- подготовка фиссур перед их герметизацией;
- создание шероховатости в полости зуба для усиления адгезии реставрационных материалов к твёрдым тканям зуба;
- препарирование и обработка при повышенной чувствительности зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПРЕП 29 мкм содержит абразивный компонент **оксид алюминия**, антислеживающий компонент, подсластитель и ароматизатор (лимон). Средний размер частиц абразива (29 мкм) и высокая его твёрдость позволяют легко препарировать твёрдые ткани зуба.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Аэр-Клинз-ПРЕП» (на основе оксида алюминия - 45 мкм)

ПРЕП 45 мкм

- препарирование твердых тканей и полостей зубов;
- удаление старых пломб, твёрдых зубных отложений;
- препарирование клиновидных дефектов зуба;
- точное препарирование зубов перед их протезированием с использованием коронок.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз»-ПРЕП 45 мкм содержит абразивный компонент оксид алюминия, антислеживающий компонент, подсластитель и ароматизатор (лимон). Абразив с размером частиц 45 мкм позволяет препарировать кариозные ткани зуба, эффективно удалять твёрдые зубные отложения, проводить препарирование клиновидных дефектов зуба и точное препарирование зубов перед их протезированием с использованием коронок.

ФОРМА ВЫПУСКА «Аэр-Клинз»-ПРОФ

артикул	форма выпуска	масса
00000005115	Порошок 120 мкм (лимон)	20 г
00000006407	Порошок 120 мкм (лимон)	300 г
00000047437	Порошок 120 мкм (вишня)	300 г
00000045891	Порошок 120 мкм (мята)	300 г
00000045892	Порошок 120 мкм (тропикана)	300 г
00000045893	Порошок 120 мкм (чёрная смородина)	300 г
00000087440	Порошок 120 мкм (Мультифрукт)	300 г
00000091670	Порошок 120 мкм (Лесные ягоды)	300 г
00000091716	Порошок 120 мкм (Крем-брюле)	300 г
00000087437	Порошок 120 мкм (Дыня)	300 г
00000087438	Порошок 120 мкм (Апельсин)	300 г
00000087439	Порошок 120 мкм (Тутти-фрутти)	300 г

ФОРМА ВЫПУСКА «Аэр-Клинз»-СОФТ

артикул	форма выпуска	масса
00000032612	Порошок 65 мкм	200 г

ФОРМА ВЫПУСКА «Аэр-Клинз»-ПЕРИО

артикул	форма выпуска	масса
00000032613	Порошок 25 мкм	120 г

ФОРМА ВЫПУСКА «Аэр-Клинз»-ПЛЮС

артикул	форма выпуска	масса
00000000000	Порошок 14 мкм	120 г

ФОРМА ВЫПУСКА «Аэр-Клинз»-ПРЕП

артикул	форма выпуска	масса
00000007000	Порошок 29 мкм	40 г
00000007725	Порошок 29 мкм	200 г
00000034833	Порошок 45 мкм	40 г
00000034834	Порошок 45 мкм	200 г

ПУ № ФСР 2007/00961 от 07.05.2018 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Air-flow classic» - «EMS», Швейцария

«Air-flow soft» - «EMS», Швейцария

«Air-flow plus» - «EMS», Швейцария

«Air-flow perio» - «EMS», Швейцария

«Abrasive powder» - «EMS», Швейцария



**СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТВЁРДЫХ
ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ПОДДЕСНЕВЫХ ЗОНАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА**

АЭР-КЛИНЗ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- удаления зубного налёта, поддесневого камня без повреждения твёрдых тканей и с одновременной полировкой зубных поверхностей;
- очищения поверхности зубных корней в поддесневом кармане;
- профилактическая обработка имплантов;
- полирования зубов.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Аэр-Клинз» суспензия изготавливается на водной основе и содержит в качестве абразивного компонента гидроксиапатит (размеры частиц 5-7 мкм) и вещества, образующие суспензию - эмульгатор, консервант и придающий суспензии приятный освежающий вкус ароматизатора (мята, манго, чёрная смородина, тропик, тутти-фрутти).

Суспензия 6 мкм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективно очищает в труднодоступных местах;
- бережно и безопасно удаляет биоплёнку, зубной и поддесневой налёт;
- вымывает из десневых карманов бактерии и эндотоксины;
- полирует поверхность корня с сохранением жизнеспособного цемента корня зуба;
- имеет набор приятных освежающих вкусов на выбор.



- Внешний вид: суспензия белого цвета.
- Плотность: $1 \pm 1,1 \text{ г/см}^3$ (20° С).
- Средний размер частиц: $\leq 10 \text{ мкм}$.

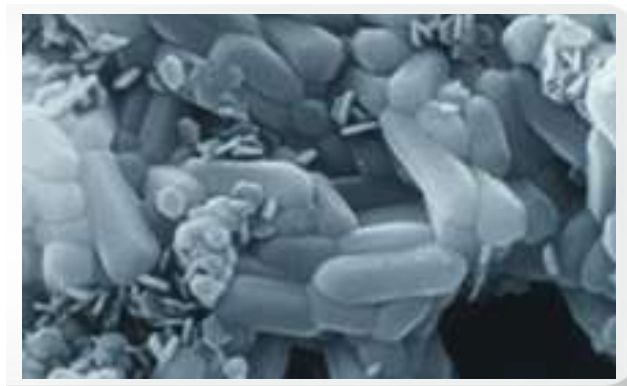


Фото под микроскопом

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000008913	Суспензия (мята)	100 мл
00000000000		250 мл
00000000000	Суспензия (манго)	100 мл
00000000000		250 мл
00000000000	Суспензия (чёрная смородина)	100 мл
00000000000		250 мл
00000000000	Суспензия (тропик)	100 мл
00000000000		250 мл
00000000000	Суспензия (тutti-фрутти)	100 мл
00000000000		250 мл

ПУ № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Vector fluid polish»-«Dürr Dental», Германия



РАЗМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ®-Р



НАЗНАЧЕНИЕ


Предназначен для выявления и размягчения зубного камня при его удалении с подвижных зубов при заболеваниях пародонта.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


Специфические свойства препарата обусловлены содержащейся в нем кислотой, которая частично растворяет соли, образующие зубной камень. Это позволяет меньше травмировать твердые ткани зуба и слизистую, чем при снятии камня обычным способом.

Эфирные масла, входящие в состав «Белгель-Р», дают ощущение свежести, а окраска зубного налета в синий цвет контрастирует с эмалью и слизистой оболочкой полости рта, что позволяет врачу проконтролировать свою работу.

Поверхность эмали зуба (электронно-ионный сканирующий микроскоп Quanta 200 3D)

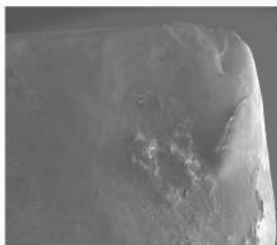

налёт на поверхности зуба

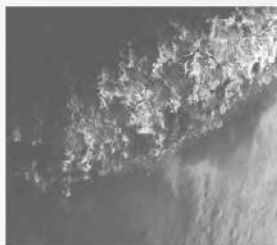

размягчение налёта
материалом «Белгель-Р»



эмаль после удаления налёта

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000000385	Гель	5 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Скалинг» – «Омега-Дент», Россия

ПУ № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОСТИ РТА

БЕЛСОЛ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- **жидкость №1 (концентрат)** - для гигиенических и профилактических полосканий полости рта пациента перед стоматологическим приемом, а также перед снятием слепков;
- **жидкость №1-F со фтором (концентрат)** – предотвращения кариеса зубов и заболеваний десен.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость №1 (концентрат) содержит хлорид алюминия, обладающий слегка вяжущим свойством, что способствует снижению кровоточивости десен, очищению полости рта от слизи и пищевых остатков, снижает слюноотделение, а также оказывает микростатическое и микробицидное действие на бактерии в полости рта.

Жидкость №1 со фтором (концентрат) содержит 1,5% фторида натрия, воду, гипоаллергенные пищевые красители, ароматизаторы и подсластители.

Из концентрата разбавлением дистиллированной водой получают нейтральный раствор (рН=7), содержащий 0,2% фторида натрия, для предотвращения кариеса.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём	артикул	форма выпуска	объём
00000002189	Жидкость-концентрат	125 мл	00000025093	Жидкость-концентрат (с фтором)	118 мл
00000018842	Жидкость-концентрат (с фтором)	125 мл		Квадрососуд Одноразовый стакан (50 шт)	1,4 л 0,2 л

ПУ № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Calypso» – «Septodont», Франция



ЖИДКОСТЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

БЕЛСОЛ® №2

НАЗНАЧЕНИЕ

Для профилактической и антисептической обработки слизистой поверхности полости рта при гингивите и начальных формах пародонтита.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

БелСол №2 содержит хлоргексидина биглюконат - антисептик широкого спектра действия, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, сохраняющий антисептические свойства при непосредственном контакте с биологическими жидкостями, снижающий образование зубного налета, эффективный в противобляшковом действии.

Жидкость готовая к применению содержит 0,05% хлоргексидина биглюконата и вкусовые добавки для улучшения органолептических свойств; эффективна при использовании для профилактических полосканий полости рта и антисептической обработки слизистой полости рта и пародонтальных карманов.

Гель содержит 0,2 % хлоргексидина биглюконата; рекомендуется к использованию для профилактической обработки лунки зуба после удаления, а также для аппликаций на область десен при их воспалении и обработки пародонтальных карманов. Гелеобразная форма позволяет наносить препарат на пораженные участки точно, исключая его воздействие на зубную эмаль.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000007813	Жидкость	100 мл
00000007813	Жидкость	250 мл
00000073759	Жидкость	500 мл

артикул	форма выпуска	объём
00000042537	Гель (шприц)	3 мл/ 5 мл
00000045529	Гель (туба)	10 г

ПУ № ФСР 2009/04655 от 26.09.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Cervitec Liquid» – «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн

«Клиническая стоматология»

научно-практический
рецензируемый журнал



Scopus



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
Science Index



ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ (ВАК)
при министерстве образования и науки
Российской Федерации

ВЛАДМИВА



**научно-популярный журнал
для стоматологов**



С уважением к коллегам,
с любовью к профессии





НАБОР ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

КОЛОР-ТЕСТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкость №1 — предназначена для выявления воспалительных процессов мягких тканей полости рта (проба Шиллера-Писарева). Проба является объективным тестом для оценки степени заболевания пародонта и эффективности проведенного лечения, может использоваться для определения распространенности воспаления и границ оперативного вмешательства при гингивэктомии, кюретаже пародонтальных каналов, для выявления поддесневых зубных отложений.

Жидкость №2 — выявление размягченной эмали и дентина при кариесе; для контроля полного удаления кариозного дентина, а также для обнаружения микротрещин в пломбах.

Жидкость №3 — предназначена для выявления мягкого и твердого зубного налета и оценки гигиены полости рта врачом или самостоятельно пациентом в домашних условиях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Свойства **«Колор-теста №1»**, в состав которого входит йод, йодистый калий и основа, определяются способностью гликогена (количество которого увеличивается при воспалении) давать окраску в процессе взаимодействия с йодсодержащими растворами. При нанесении **«Колор-теста №1»** на мягкие ткани полости рта происходит окрашивание воспаленных участков.

В состав **«Колор-теста №2»** входит фуксин основной, который адсорбируется на поврежденном белке твердых тканей зуба и окрашивает в красно-фиолетовый цвет размягченные эмаль и дентин. Здоровые ткани зуба - эмаль и минерализованный дентин при этом окрашиваться не будут. Таким образом врач-стоматолог может определить уровень оперативного вмешательства.

Содержащаяся в жидкости **«Колор-тест №3»** метиленовая синь окрашивает бактериальный зубной налет в синий цвет, не изменяя цвета интактных твердых тканей и слизистой оболочки полости рта.



1. Нанести аппликатором Колор-тест №3

2. Промыть полость рта для удаления незафиксированной окраски



3. Зубной налёт окрашивается в синий цвет

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000049	Жидкость №1	20 мл
00000000051	Жидкость №2	20 мл
00000000052	Жидкость №3	20 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Caries Detektor» – «Kuraray Dental», Япония
 «Caries Marker» – «Voco», Германия
 «Snoop» – «Pulpdent», США



НАБОР АБРАЗИВНЫХ ПОЛИРУЮЩИХ ПАСТ

ПОЛИДЕНТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Паста №1 - размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали.

Паста №2 - удаление мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для профилактики кариеса методом снятия зубных отложений.

Паста №3 - отбеливание, реминерализация и фторирование зубной эмали.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Полидент №1» характеризуется совокупностью химического и механического воздействия на твердые зубные отложения. Кислотная составляющая пасты размягчает твердые отложения, абразив счищает их с поверхности зубов при обработке, а антисептик предохраняет от повторного отложения зубного налета.

Паста «Полидент №2» (без фтора) содержит абразив, позволяющий производить очистку эмали и фиссур с минимальным риском повреждения их поверхности. Пастообразователь, придающий пасте пластичную консистенцию, удобную в работе. Гидрофильный пастообразователь позволяет легко удалять пасту водой с поверхности зубов.

Отбеливающие свойства **пасты «Полидент №3»** определяет перекись карбамида - наиболее эффективный отбеливатель, щадящий эмаль. Абразив легко снимает мягкий налет, фториды и производные фосфора реминерализируют и защищают эмаль зубов.



ДО ЧИСТКИ



ПОСЛЕ ЧИСТКИ

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	масса
00000000108	набор Паста №1, 2, 3	40г/40г/30г
00000000094	Паста №2 (без фтора)	5 мл
00000007811	Паста №2 (без фтора)	90 г

артикул	форма выпуска	масса
00000000093	Паста №1	5 мл
00000007812	Паста №1	90 мл
00000000096	Паста №3	5 г

ПУ № ФСР 2008/03037 от 19.12.2017 г.

Выпускаются набором (в банках) и отдельно (в шприцах и тубах)



АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Detartrine» - «Septodont», Франция
 «Detartrine Z» - «Septodont», Франция
 «Klinton» - «Voco», Германия; «Clean Joy» - «Voco», Германия
 «Remin Pro» - «Voco», Германия



КОМПЛЕКТ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

ДЕСЕНСИЛ®

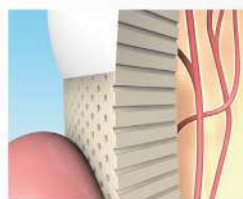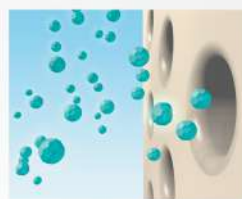открытые
дентинные
канальцыобработка
десенсилайзеромобразование
изолирующего
барьера

НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение болевой чувствительности дентина при клиновидном дефекте, оголении пришеечной части коронки зуба, при эрозии эмали, а также обработка культи «живого» зуба, препарированного под коронку, и глубоких полостей в качестве лечебной прокладки.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В комплект жидкостей «ДЕСЕНСИЛ - ВладМиВа» входят:

Жидкость №1 - раствор, содержащий фосфат, карбонат калия и антисептик.

Жидкость №2 - раствор солей кальция и стронция.

При последовательной обработке жидкостями растворимые соли калия глубоко проникают в дентинные канальца, снижая передачу нервного импульса и уменьшая болевую проводимость, а на поверхности дентина и в дентинных канальцах происходит реакция с образованием микрокристаллического слоя (3 мкм) нерастворимых солей (фосфатов и карбонатов кальция и стронция).

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000002112	Жидкость №1	15 мл
	Жидкость №2	15 мл

Не относится к медицинским изделиям.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«UltraEZ» - «Ultradent», США

«Sensitive Pro-Relief» - «Colgate» США

«Isodan» - «Septodont», Франция

ГЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО СНИЖЕНИЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

ДЕСЕНСИЛ® - АКТИВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Позволяет быстро снизить как имеющуюся гиперчувствительность зубов, так и гиперчувствительность дентина, вызванную проведением стоматологических процедур.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав материала «Десенсил-Актив» входит: деионизированная вода, сорбитол, диоксид кремния, L-аргинин, монофторфосфат, антибактериальная добавка, увлажнитель, пищевой ароматизатор.

Гель надежно закрывает дентинные канальца, полностью блокирует болевые ощущения, обладает быстрым действием и пролонгированным эффектом, а так же щадящими полирующими свойствами.

«Десенсил-Актив» может использоваться как до, так и после стоматологических процедур, таких как профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов). При регулярном использовании создает долговременный барьер, защищающий от повышенной чувствительности зубов.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000032611	Гель	10 мл



АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Sensitive Pro-Relief» - «Colgate» США

«Elmex sensitive professional» - «Gaba international», Швейцария



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НА ОСНОВЕ ПЕРОКСИДА КАРБАМИДА (12%, 20%, 30%)

БЕЛАГЕЛЬ® - О



НАЗНАЧЕНИЕ

- устранение дисколораций как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом;
- отбеливание депульпированных зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белгель-О» - универсальная отбеливающая гелевая система с пероксидом карбамида в качестве наиболее современного и щадящего отбеливающего агента. Пероксид – источник атомарного кислорода, под действием которого происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зуба. Активный кислород устраняет бактерии, способствующие формированию неприятного запаха. Отбеливающий гель содержит 30% воды, следовательно, не происходит высушивание и обезвоживание твердых тканей. Зубы не теряют блеск. Входящие в состав «Белгель-О» ионы калия предотвращают появление чувствительности зубов.

В зависимости от концентрации пероксида карбамида препарат может использоваться как в домашних условиях под наблюдением стоматолога (12%, 20%), так и в условиях клинического приема (30%).

Рекомендуется сочетать домашнее отбеливание с клиническим.

При пломбировании и реставрации зубов рекомендуется предварительно провести отбеливание зубного ряда с целью правильного выбора оттенка реставрационного материала.

Также, мы предлагаем **набор гелей** (домашнее и клиническое отбеливание) для комплексного воздействия на твердые ткани зуба.



название материала	отбеливающее вещество	клиническое отбеливание	домашнее отбеливание
«Белгель-О» (30%)	пероксид карбамида	разрешается	не разрешается
«Белгель-О» (20%)	пероксид карбамида	разрешается	разрешается
«Белгель-О» (12%)	пероксид карбамида	разрешается	разрешается
«Белгель-О эндо» (60%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белгель-О актив» (30%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белгель-О актив» (20%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белгель-О лайт» (15%)	перекись водорода	разрешается	не разрешается
«Белгель-О вайт» (6%)	перекись водорода	разрешается	разрешается

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000015	Гель 12%	5 мл
00000000016	Гель 20%	5 мл
00000000017	Гель 30%	5 мл
00000000011	набор 12%	
	Белгель-О	4 шт 1 мл
	Белгель-Са/Р	2 шт 1 мл
	Белгель-Ф	2 шт 1 мл
	Паста для защиты слизистой Каппа	1 шт 5 мл 2 шт

артикул	форма выпуска	объем
набор 20% 00000000012	Белгель - О	4 шт 1 мл
	Белгель - Са/Р	2 шт 1 мл
	Белгель - F	2 шт 1 мл
	Паста для защиты слизистой	1 шт 5 мл
	Лак компенсационный	1 шт 5 мл
	Каппа	2 шт 12 мл
набор 30% 00000000013	Белгель-О	5 мл
	Белгель-Са/Р	5 мл
	Белгель-Ф	5 мл
	Паста для защиты слизистой	5 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Opalescence» – «Ultradent», США
«Perfect Bleach» – «Voco», Германия



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА
НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 20% И 30%

БЕЛАГЕЛЬ® - О АКТИВ



НАЗНАЧЕНИЕ

Устранение дисколораций как изначально имевшихся на зубах, так и появившихся с возрастом, а также для отбеливания депульпированных зубов, включая внутрикоронковое отбеливание.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав отбеливающей системы «Белгель-О» Актив входят: гель на основе 20% (30%) перекиси водорода и гель, содержащий щелочной активатор.

При смешивании двух гелей перекись водорода распадается с образованием активных радикалов, под действием которых происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зубов. Голубая окраска геля облегчает контроль за процессом отбеливания.

Применение системы «Белгель-О» Актив обеспечивает улучшение цвета зубов на 6-8 оттенков по шкале VITA.

Гель, как и любое другое средство для отбеливания, не осветляет реставрационные материалы.




Белгель-О-Актив 20%



Белгель-О-Актив 30%

СХЕМА ПРОЦЕССА ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

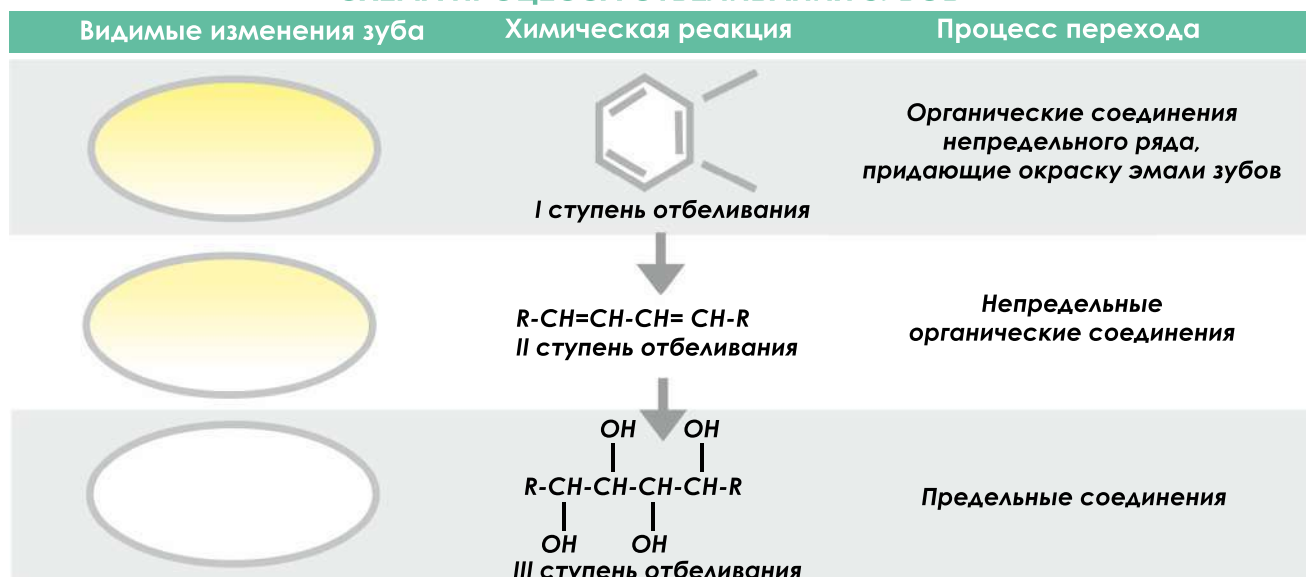

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000008916	Гель 20%	1,5 мл
	Гель активатор	1,5 мл
	Каппа	2 шт
00000009306	Гель 30%	1,5 мл
	Гель активатор	1,5 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Opalescence Xtra Boost» – «Ultradent», США



БЕЛАГЕЛЬ® - О лайт

НАЗНАЧЕНИЕ

Компоненты геля «Белгель-О» лайт способны поглощать определенный спектр света, который активизирует действие отбеливающего геля.

Применение геля «Белгель-О» лайт обеспечивает улучшение цвета зубов на 6-8 оттенков по шкале VITA.

Гель наиболее эффективно удаляет желтые и коричневые пятна на зубах, которые ранее не подвергались отбеливанию и может применяться для отбеливания всех типов пятен.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед процедурой отбеливания провести профилактику полости рта пациента.

Защитить мягкие ткани полости рта кофердамом. С помощью кисточки гель наносят на зубы слоем толщиной 1-2 мм и равномерно распределяют.

После нанесения геля установить лампу «Zoom» в рабочее положение так, чтобы свет был сфокусирован на зубах. Рекомендуется проводить 3 цикла отбеливания по 20 минут.

По окончании процедуры отбеливания рекомендуется провести реминерализацию и фторирование зубов пациента.

АКТИВИРУЕТСЯ СВЕТОМ



до



после

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000008915	Гель 15%	1,5 г
00000025806	Гель 10%	1,5 г

РУ № ФСР 2009/ 06282 от 23.10.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Brite Smile Professional Teeth Whitening» - «Brite Smile», Inc, США



ГЕЛЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 6%

БЕЛАГЕЛЬ® - О вайт

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мобильное средство для осуществления полноценного курса отбеливания естественных зубов, а также для поддержания белизны зубов после процедуры профессионального отбеливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Перед процедурой отбеливания рекомендуется высушить зубы при помощи салфетки.



2. Поместите ретрактор в полость рта.



3. Аккуратно нанесите тонкий слой геля на переднюю поверхность зубов, избегая попадания на десны и губы.



4. Подождите в течение 30 секунд, пока отбеливающее вещество не подсохнет.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000037834	набор гелей: Белгель-О Вайт 6% Белгель-Са/Р Ретрактор	2,5 мл 2,5 мл 1 шт

ПУ № ФСР 2009/ 06282 от 23.10.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Brite Smile Professional Teeth Whitening» - «Brite Smile», Inc, США



РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ® - Ca/P




НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика кариеса на начальной его стадии - белого пятна;
- реминерализация эмали при некариозных ее поражениях, возникших в период формирования зубов;
- при гиперестезии твердых тканей зуба, гипоплазии эмали, эрозии твердых тканей зуба и т. п.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Составные компоненты реминерализующего геля «Белгель-Са/Р» - ионы, входящие в состав здоровой зубной эмали, активно проникают в эмаль и дентин пораженных зубов и способствуют их минерализации. 1 г материала «Белгель-Са/Р» в ионном виде содержит: 11 мг ионов кальция, 5 мг фосфора, 32 мг хлора, 1,8 мг ионов калия, 0,9 мг ионов магния и 20 мг ионов натрия.

При нанесении геля на поверхность зуба и высушивании образуется плёнка, реминерализующая ткани зуба в течение 3-5 ч. Для более длительной аппликации гель используют с применением каппы.

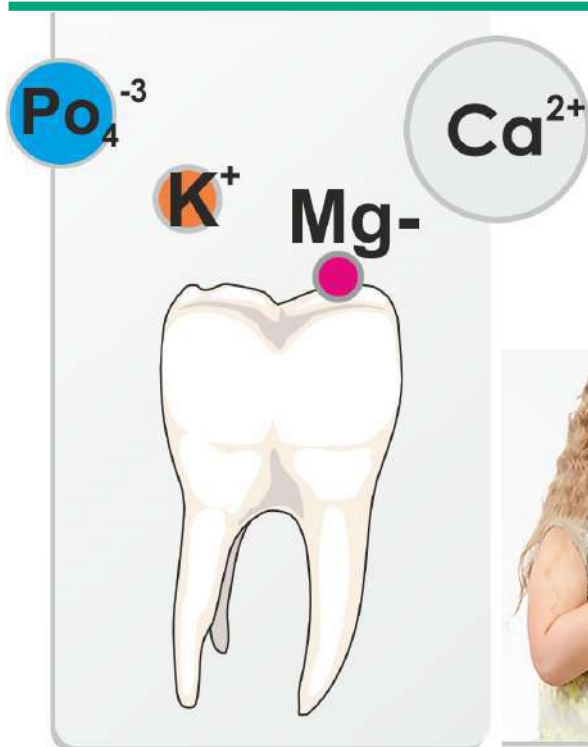

1 г «Белгель-Са/Р» содержит:

11 мг ионов кальция,
5 мг фосфора,
32 мг хлора,
1,8 мг ионов калия,
0,9 мг ионов магния,
20 мг ионов натрия



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000001149	Гель	5 мл
00000013021	Гель	10 г
00000037853	Гель (ручка-кисточка)	2,5 мл



Схема реминерализующей терапии с применением геля «Белгель Са/Р» для различных клинических ситуаций

ЗАБОЛЕВАНИЕ	ФОРМА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ
Профилактика	Кариес зубов и некариозные поражения зубов 2 группы	2 курса в год по 10-15 аппликаций ежедневно или через день
Кариес зубов	Компенсированная форма кариеса (1 полость в год)	3-4 курса по 10-15 аппликаций в течение года
	Декомпенсированная форма кариеса (2-3 полости в год)	В течение первого месяца ежедневно, повторно через 2 месяца, при стабилизации заболевания перейти к режиму, как при компенсированной форме кариеса
На кариозное поражение зубов	Поражения, возникающие до прорезывания зубов: гипоплазия, флюороз, медикаментозные.	На стадии белого пятна - до исчезновения пятен (6-10 месяцев)
		При эрозивных формах - в течение 1 месяца, с дальнейшим пломбированием материалами, не требующими протравливания кислотой
	Поражения, возникающие после прорезывания зубов	Если планируется пломбирование, аппликации геля в течение 3-5 недель (в случае некроза – ежедневно до одного года)
		При наличии неглубоких дефектов в пределах эмали- ежедневно аппликации в течение 2-4 месяцев могут привести к достаточному эстетическому результату без пломбирования. Курс повторяется по показаниям 2-3 раза в год
Гиперестезия зубов	Системная	Ежедневно до исчезновения симптомов
Отбеливание зубов	В течение курса	Сразу после каждой процедуры отбеливания
	По завершении курса	Ежедневно в течение 1-2 недель
Ортодонтическое лечение	В течение всего периода лечения	Ежедневно после тщательной очистки зубов и ортодонтических конструкций от мягкого зубного налета
	По завершении лечения	Ежедневно в течение одного месяца



ФТОРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

БЕЛАГЕЛЬ® - F

НАЗНАЧЕНИЕ

Профилактика кариеса зубов:

- при гиперестезии зубов;
- при клиновидных дефектах;
- при травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белгель»-F (pH=4) - на основе природных полисахаридов, содержит 1,23% иона фтора, ксилит и витамин Е.

«Белгель»-F (pH=7) - на основе природных полисахаридов.

Гели обладают высокой проникающей способностью ионов фтора (F-) в ткани зуба, стимулируют минерализацию твердых тканей зуба, способствуют восстановлению зубной эмали и предохраняют зубы от кариеса.



ФТОРИРУЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ (pH=4,0) ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА:

- Благодаря высокой проникающей способности ионов фтора и степени кислотности материала, на аппликацию требуется всего 2-3 минуты.
- Гель нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта.

Рекомендован пациентам с живыми зубами.

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000014	pH 7 Гель	5 мл
00000059439	Гель клубника	5 мл
00000045530	Гель	10 г
00000061795	Гель мята	500 мл
00000056104	Гель	500 мл
00000060092	Гель вишня	500 мл
00000056104	Гель клубника	500 мл
00000060093	Гель апельсин	500 мл

ПУ № ФСР 2009/ 06282 от 23.10.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Fluoridin Gel №5» - «Voco», Германия
 «Topex APF» - «Dentsply», США
 «Gelabo APF» - «DEEPAK PRODUCTSP», США
 «Sherbet APF gel» - «Sherbet», США-Китай



ФТОРИРУЮЩИЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ (pH=7,0) ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОМАШНЕГО УХОДА:

- Альтернатива кислотным гелям.
- Не вызывает коррозии реставраций.
- Время аппликации - 4 - 5 мин.
- Подходит для пациентов, которым необходимо лечение фторсодержащими материалами в домашних условиях.

Рекомендован пациентам с фарфоровыми, керамическими реставрациями или брекетами.





ФТОРИРУЮЩИЙ ЛАК

БЕЛАК® - F

Стоматологический материал «Белак-F» выпускается в формах:

- «Белак-F» белый;
- «Белак-F» прозрачный.


НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика кариеса зубов у детей и подростков;
- лечебное средство при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.


СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Белак-F» белый. В его состав входят растворитель, пленкообразователь, калий фтористый. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

«Белак-F» прозрачный. В его состав входят природный пленкообразователь, соединение фтора нового поколения (аминофторид), антисептический компонент и растворитель. Ионы фтора, содержащиеся в препарате, укрепляют эмаль зубов, снижают ее проницаемость, предохраняют зубы от развития кариеса.

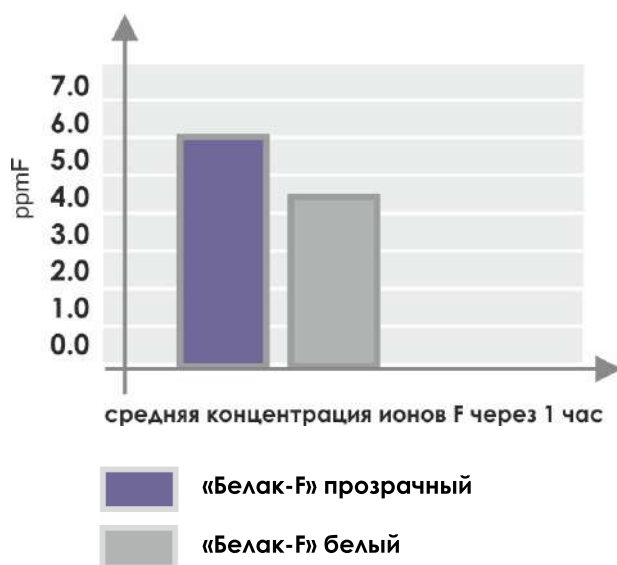


МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛАКА БЕЛАК-F

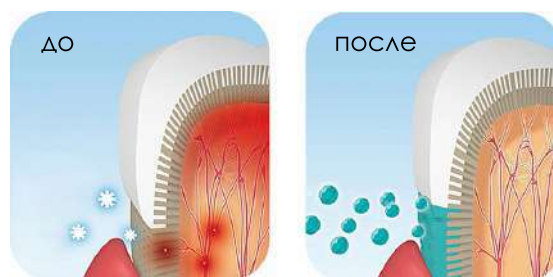

«Белак-F» создает защитную пленку, хорошо запечатывает структуру зуба.

Поверхность зуба (электронно-ионный сканирующий микроскоп Quanta 200 3D)

«Белак-F» проникает в каналцы и запечатывает их

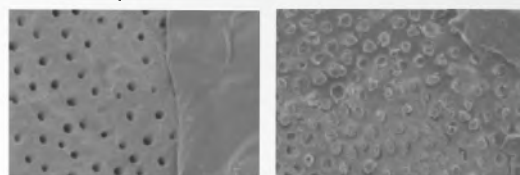

Фтор активно участвует в процессе формирования зубов. Недостаток фтора в воде и пище способствует быстрому развитию кариеса. Процедура фторирования позволяет создать защитную пленку, что заметно тормозит процесс развития кариеса.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000000010	Лак (белый)	25 мл
00000015719	Лак (прозрачный)	25 мл
00000035794	Лак (шприц)	3 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Profluorid varnish» – «Voco», Германия
«Fluor Protector N» – «Ivoclar Vivadent», Лихтенштейн



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА

ГЛУФТОРЭД®

НАЗНАЧЕНИЕ

Глубокое фторирование эмали и дентина при:

- профилактике и лечении первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна;
- профилактике кариеса до и после использования ортодонтических конструкций;
- герметизации фиссур (без препарирования эмали) с эффектом глубокой минерализации;
- лечении гиперчувствительности пришеечной области зуба, снижении чувствительности дентина после препарирования полости и культи зуба;
- изоляции пульпы от химического воздействия мономеров и кислот, входящих в состав композитных материалов и других видов пломб;
- лечении пародонитов.



Глубокое фторирование - это образование субмикроскопических кристаллов CaF_2 не на поверхности, а непосредственно в порах разрыхленной зоны эмали, канальцах дентина и в зубном цементе.



кристаллы, имея малую величину (50А), располагаются внутри воронок эмали (100А)

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В стоматологический комплект «Глуфторэд» входят:

- **жидкость** - раствор голубого цвета, содержащий ионы фтора и меди;
- **суспензия** - мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора.

В результате последовательного нанесения жидкости и суспензии происходит герметизация микротрещин эмали, канальцев дентина и цемента. Образующаяся субстанция представляет собой высокомолекулярный полимер кремниевой кислоты с отложившимися в нем субмикроскопическими кристалликами фтористого кальция, фтористого магния и фтористой меди - II. Она является щелочной по своей природе и исключительно плотной, что обеспечивает эффективную защиту дентина и пульпы от воздействия кислот и мономеров, содержащихся в композитных материалах.

В отличие от обычного фторирования, при проведении глубокого фторирования микрокристаллики фтористого кальция, размерами менее 1 микрона, образуются непосредственно в дентинных канальцах и порах поврежденной эмали, что обеспечивает эффективную, длительно действующую защиту от кариеса.

Субмикроскопические кристаллы фтористого кальция являются постоянным источником фторид-ионов, обеспечивающих длительную реминерализацию и эффективную герметизацию твердых тканей. Соединения меди гарантируют эффективную защиту твердых тканей зуба от кариесогенных микроорганизмов.

Глубокое фторирование не снижает адгезию и ретенцию пломбировочных и реставрационных материалов.

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объем
00000001726	Жидкость Суспензия	10 мл 10 мл

ПУ № ФСР 2007/ 00998 от 23.10.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Эмаль и дентин герметизирующий ликвид» - «Humanchemie», Германия



ФТОРИРУЮЩИЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СМОЛ
И НАНОДИСПЕРСНОГО ГИДРОКСИАПАТИТА

НАНОФЛЮОР®

для глубокого фторирования
и ускоренной реминерализации




НАЗНАЧЕНИЕ

- профилактика и лечение первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, кариеса корня, а также при лечении клиновидных дефектов;
- после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов;
- после удаления бреккет-систем и полировки эмали зубов и пломб;
- после кюретажа пародонтальных карманов для защиты при шейечной области зуба при цервикальной гиперестезии;
- при лечении гиперестезии зубов после применения техники травления (реставрация композиционными материалами, герметизация фиссур, установка брекет-систем);
- при абразивном повреждении эмали и дентина в результате неправильной чистки зубов или при травмировании зубов;
- при обработке контактных поверхностей соседних зубов с несъемными ортопедическими конструкциями;
- при лечении и профилактике кариеса у детей и подростков: сохранение временных зубов до появления постоянных, герметизация фиссур в стадии их созревания, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов;
- перед пломбированием для изоляции глубоких полостей зуба.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «Нанофлюор» содержит:

- аминофторид и фторид натрия, повышающие резистентность зубной эмали к воздействию кислот. Органическое соединение фтора аминофторид обладает повышенной фторирующей активностью с длительным терапевтическим действием. Оптимальное содержание фторирующих компонентов, обеспечивающих мгновенную изоляцию зубов от различного рода раздражителей;
- природную смолу, обладающую антисептическими и бактерицидными свойствами, способную образовывать тонкую прочную плёнку, не влияющую на адгезию реставрационных материалов к дентину;
- нанодисперсный коллоидный гидроксиапатит, способствующий восстановлению минеральной структуры эмали зуба, реминерализации дентина глубокой кариозной полости и нормализации функционального состояния пульпы зуба.

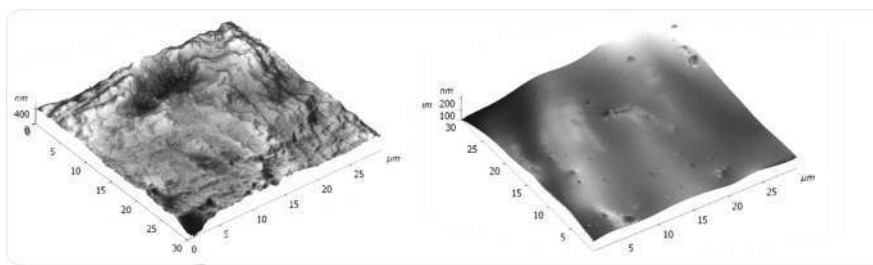

Скан поверхности
шлифа зуба, выполненный на
атомно-силовом
микроскопе NTEGRA AURA


Скан поверхности
шлифа зуба, **предварительно
покрытый лаком «Нанофлюор»**,
выполненный на атомно-силовом
микроскопе NTEGRA AURA

ФОРМА ВЫПУСКА


артикул	форма выпуска	объём
00000007472	Лак	5 мл
	Растворитель	5 мл

ПУ № ФСР 2007/ 00836 от 22.11.2017 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Bifluorid 12» – «Voco», Германия
«Copal Varnish» – «PD», Швейцария

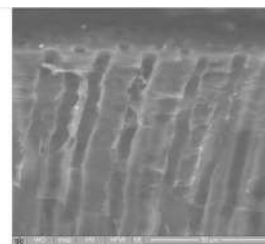

открытые
дентинные каналы

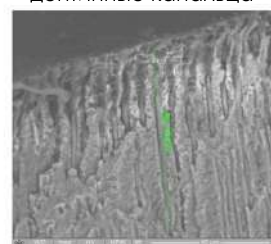

Поперечный скол дентина,
поверхность которого
предварительно обработана
лаком «Нанофлюор»

электронно-ионный

сканирующий микроскоп Quanta 200 3D



ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЕРЕБРЕНИЯ И ФТОРИРОВАНИЯ ЗУБОВ

АРГЕНАТ®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии



НАЗНАЧЕНИЕ

«Аргенат» однокомпонентный - предназначен для фторирования и снижения чувствительности зубов (кроме фронтальных), предотвращения развития вторичного кариеса, а также для серебрения корневых каналов зубов при начальных формах развития кариозных процессов (особенно кариеса молочных зубов).

«Аргенат» двухкомпонентный - предназначен для серебрения инфицированных и труднопроходимых каналов, кариозных молочных зубов, а также зубов, пораженных пришеечным кариесом.



СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА


«Аргенат» однокомпонентный выпускается в виде бесцветной прозрачной жидкости, содержащей комплексную соль фторид диамминсеребра (I). Действие материала основано на преобразовании ионов кальция и ортофосфат-ионов гидроксиапатита зуба во фторид кальция и ортофосфат серебра, которые коагулируют протеины органической составляющей дентина, блокируя проникающие полости твердых тканей зуба что приводит к укреплению структуры дентина. Клиническая эффективность однокомпонентного «Аргената» в несколько раз выше, чем у препаратов на основе нитрата серебра.

«Аргенат» однокомпонентный не обладает раздражающим действием на пульпу, так как на поверхности дентина образуется фторид кальция, сужающий дентинные канальца, тем самым затрудняющий проникновение ионов серебра.

Двухкомпонентный «Аргенат» для серебрения твердых тканей зуба включает: жидкость №1, содержащую серебро в ионной форме, жидкость №2 с восстановителем серебра, вазелиновое масло для изоляции слизистой поверхности при серебрении молочных зубов и пришеечной части зубов.

Метод серебрения заключается в проникновении ионов серебра в макро и микроканальца твердых тканей зуба, восстановлении и отложении серебра в дентинных канальцах в виде густо расположенных зерен, заполняющих просвет канальцев почти полностью.

Бактерицидное действие материала носит пролонгированный характер, обеспечивает подавляющее воздействие на ферменты, разрушающие минеральные вещества молочных зубов.

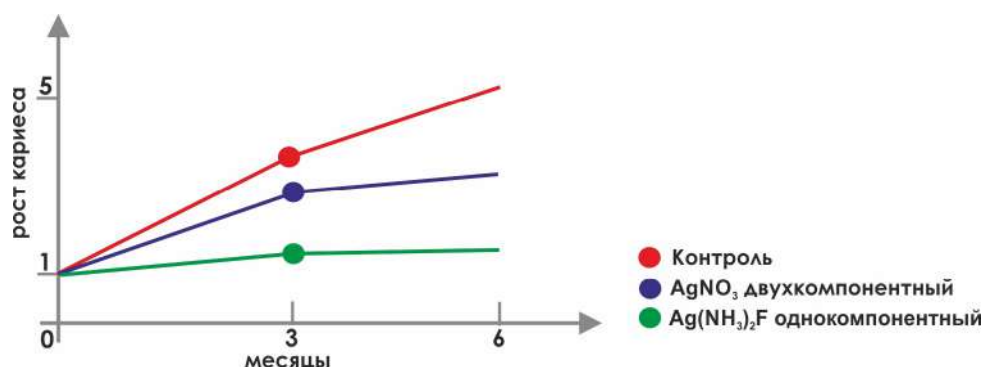

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000001575	Жидкость	5 мл
00000000001	Жидкость №1	4 мл
	Жидкость №2	3 мл
	Масло вазелиновое	5 мл

ПУ № ФСР 2007/ 00141 от 11.09.2017 г.


АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Safotide» - «Neo chemical dental», Япония
«Cariostatic» - «Vatar Proxima», Бразилия




ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИОНОВ В ДЕНТИННЫЕ КАНАЛЬЦА


БЕЛАГЕЛЬ- F

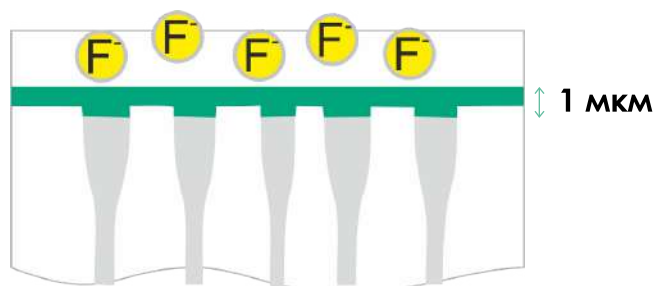


БЕЛСОЛ №1- F

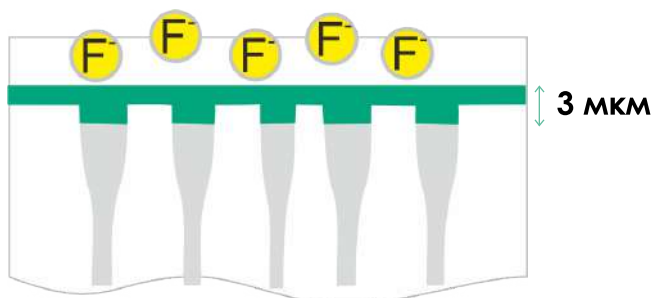


БЕЛАК- F

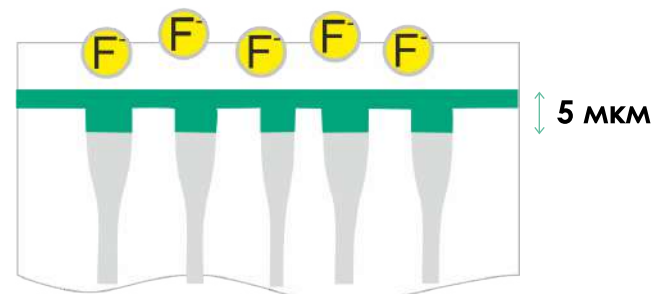


НАНОФЛЮОР

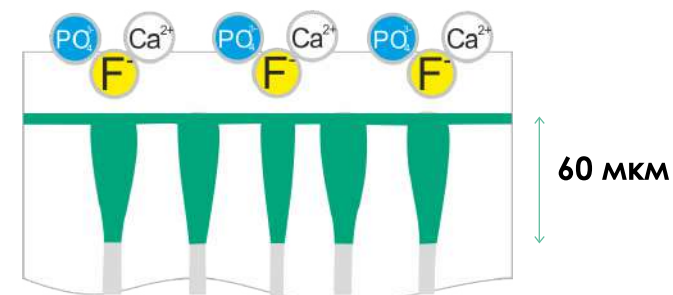

ГЛУФТОРЭД

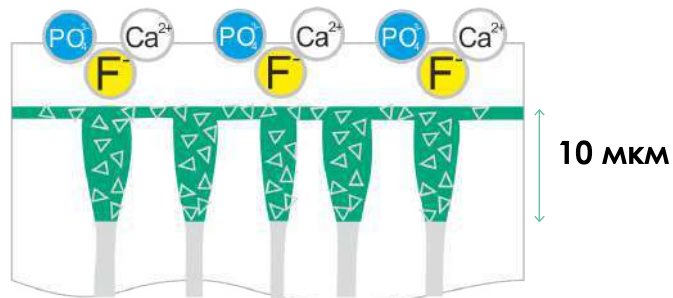

АРГЕНАТ

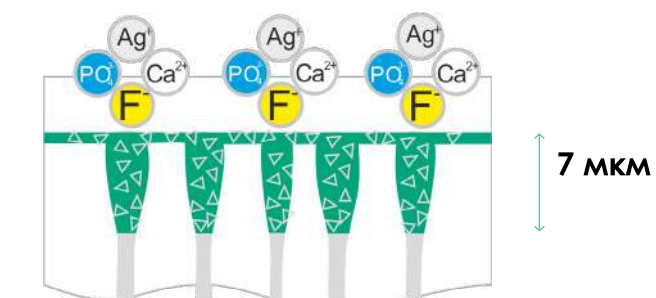



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФИССУР ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

ФИССХИМ®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии

НАЗНАЧЕНИЕ

Запечатывание фиссур и других анатомических углублений интактных зубов и изоляция участков, чувствительных к поражению кариесом от бактериальной среды ротовой полости.



открытая фиссура



запечатанная фиссура




СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Герметик химического отверждения «Фиссхим» представляет собой композит на основе органического связующего Бис-ГМА, НЕМА и силанизированного тонкодисперсного кварцевого наполнителя.

«Фиссхим» состоит из двух паст: основной и каталитической. Входящие в состав герметика фторсодержащие компоненты обеспечивают кариеспротективный эффект.

Динамика фторовыделения

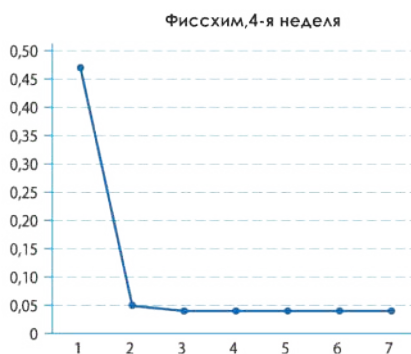

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000001566	Паста основная белая	3 мл
	Паста каталитическая	3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл
00000025846	Паста основная жёлтая	3 мл
	Паста каталитическая	3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл
00000025847	Паста основная зелёная	3 мл
	Паста каталитическая	3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл
00000025848	Паста основная синяя	3 мл
	Паста каталитическая	3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл
00000025849	Паста основная красная	3 мл
	Паста каталитическая	3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл

артикул	форма выпуска	объём
00000022950	набор:	
	Паста основная:	
	жёлтая	3 мл
	зелёная	3 мл
	синяя	3 мл
	красная	3 мл
	Паста каталитическая	4 шт x 3 мл
	Гель для травления эмали	5 мл

ПУ № ФСР 2009/ 05516 от 14.02.2018 г.

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
«Фиссил» – «Стомадент», Россия
«Delton» – «Jonson & Jonson», США



ГЕРМЕТИК ДЛЯ МИКРОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ФИССУЛАЙТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- микроинвазивное лечение поверхностного кариеса с локализацией кариозного дефекта в границах эмаливой поверхности (контактные, вестибулярные);
- лечение кариеса в стадии «белого пятна», а так же после снятия брекетов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В комплект «Фиссулайт» входят:


- «Белгель»-Р гель на основе соляной кислоты (15%);
- кондиционер, содержащий этанол;
- однокомпонентный светоотверждаемый прозрачный герметик низкой вязкости, обладающий высокой проникающей способностью.

Метод герметизации основан на закрытии кариозных пор эмали, что способствует восстановлению ее целостности с максимальным сохранением здоровых тканей зуба, обеспечивая повышенную устойчивость целостности с максимальным сохранением здоровых тканей зуба, обеспечивая повышенную устойчивость герметика должна быть тщательно высушена.

При использовании комплекта «Фиссулайт» для лечения кариозных поражений на вестибулярных поверхностях можно использовать жидкий коффердам «ТемпоФот».

Преимущества:

- устраняет последствия ношения несъемных ортодонтических конструкций (брекет систем);
- максимально сохраняет здоровые ткани зуба;
- останавливает прогрессирование кариозных процессов;
- улучшает эстетику улыбки.

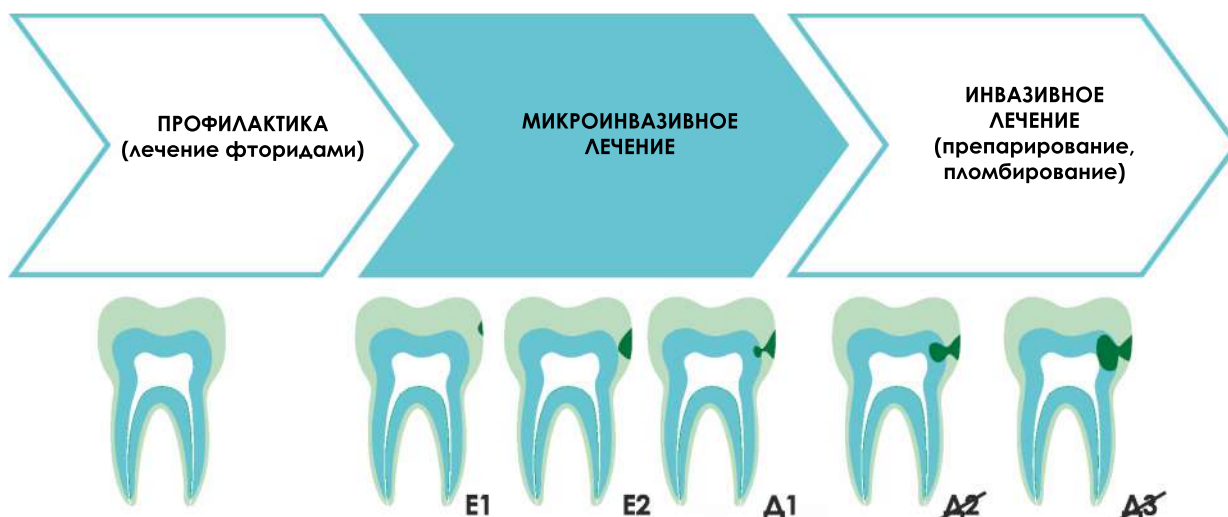

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	нетто
00000067840	Прозрачный герметик Кондиционер Гель «Белгель»-Р	3 мл 5 мл 3 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«ICON» – «DMG», Германия

РУ № ФСР 2011/ 11998 от 13.02.2018 г.




ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФИССУР СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

ФИССУЛАЙТ®

серии «КАЛЕЙДОСКОП» -
материал для детской стоматологии

НАЗНАЧЕНИЕ

Запечатывание фиссур и других анатомических углублений интактных зубов.

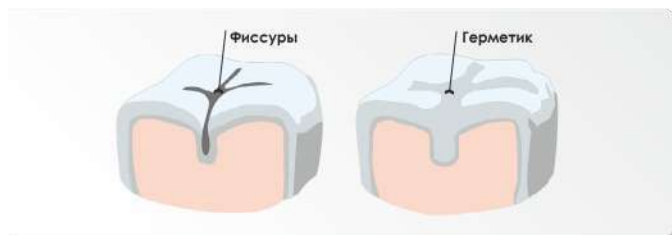

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Герметик «Фиссулайт» представляет собой светоотверждаемый однокомпонентный композиционный материал низкой вязкости, устойчивый к истиранию, содержащий фторирующие компоненты, которые обеспечивают кариеспротективный эффект.


Герметик «Фиссулайт» выпускается в виде пасты (белой, прозрачной и цветной с мерцающим эффектом). Цветные герметики удобно наносить и визуальнo контролировать во время запечатывания и последующих проверок.

Яркая цветовая палитра (6 цветов) поможет завоевать доверие маленького пациента, предоставив ему возможность участвовать в процессе лечения при выборе цвета герметика.

Входящие в состав герметика пищевые красители соответствуют нормам международных стандартов и не вымываются из отвержденного материала. Светоотверждаемый герметик позволяет экономить время. Шприцы с насадками для прямого применения дают возможность легко и точно наносить герметик на препарируемую фиссуру.



Динамика фторовыделения

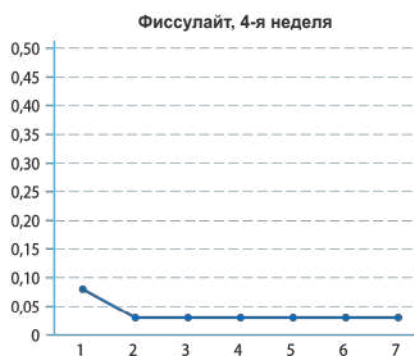

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000008918 / 00000051781	Паста	Шприц/капсулы
00000010401 / 00000052568		
00000010043 / 00000052567		
00000010042 / 00000052565		
00000010040 / 00000052598		
00000010045 / 00000052566		
00000010044 / 00000000000		
00000000127	белая	1 мл
	прозрачная	1 мл
	Гель для травления эмали на орг. основе	1 мл

артикул	форма выпуска	объём
00000008917	набор 7 цветов	
	прозрачная	1 мл
	белая	1 мл
	золотая	1 мл
	оранжевая	1 мл
	красная	1 мл
	зелёная	1 мл
	синяя	1 мл
	Гель для травления на орг. основе	3 мл

АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Fissurit» - «Voco», Германия
«Fisseal» - «Willmann & Pein GmbH», Германия
«Clinpro Sealant» - «3M Espe», США
«Twinky Star» - «Voco», Германия



ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

КОЛОРДЕНТ®

НАЗНАЧЕНИЕ

- окрашивание эмали зубов в белый цвет с глянцевым или перламутровым блеском;
- декоративное окрашивание зубов в различные цвета.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Лак «КолорДент» содержит: природный пленкообразователь, способный образовывать тонкую прочную пленку, обладающий антисептическими и бактерицидными свойствами; растворитель; загуститель; колеровочную пасту на основе диоксида титана или пигментов другого цвета, а также реминерализующую добавку (гидроксиапатит), способствующую восстановлению минеральной структуры зуба.

Лак безопасен в использовании, не вредит слизистой оболочке полости рта, легко удаляется зубной щеткой.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед применением хорошо встряхнуть ручку (флакон) с лаком;
- Поместить роторасширитель в полость рта;
- Очистить и высушить поверхность зубов марлевым шариком или диском;
- Снять колпачок с кисти и повернуть нижнюю часть ручки по часовой стрелке до тех пор, пока на кисти не появится небольшое количество лака (при первом использовании потребуются сделать несколько оборотов до появления лака);
- Нанести лак тонким слоем на поверхность зуба в направлении от десны к режущему краю;
- Подождать 1,5-2,5 минуты (не закрывая рта);
- При необходимости, нанести лак повторно (после полного высыхания первого слоя).



ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000018780	Лак 12 шт	6 мл
00000018709	Белая эмаль (тон 1)	6 мл
00000037181	Лак (ручная-кисточка)	3 мл
00000018710	Белая эмаль (тон 2)	6 мл
00000037182	Лак (ручная-кисточка)	3 мл
00000022838	Лак изумрудные искры	6 мл
00000022839	Лак серебряные искры	6 мл
00000022840	Лак золотые искры	6 мл
00000022841	Лак чёрный	6 мл
00000022842	Лак сиреневый	6 мл
00000022844	Лак розовый	6 мл
00000022845	Лак желтый	6 мл
00000022846	Лак красный	6 мл
00000022847	Лак синий	6 мл
00000022848	Лак зелёный	6 мл

ПУ № ФСР 2010/07019 от 22.11.2017 г.



СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЛАК
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ
ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

КОЛОРДЕНТ® - LC

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное окрашивание зубов в различные цвета.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«КолорДент-LC» представляет собой **свето-отверждаемый** однокомпонентный композиционный материал низкой вязкости, устойчивый к истиранию, содержащий фторирующие компоненты, которые обеспечивают кариеспротективный эффект.

Материал «КолорДент-LC» выпускается в виде пасты (белой, прозрачной и цветной с мерцающим эффектом). Входящие в состав пищевые красители соответствуют нормам международных стандартов.

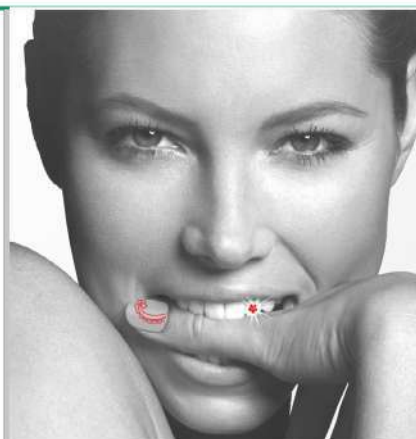

ФОРМА ВЫПУСКА

артикул	форма выпуска	объём
00000018844	Паста 7 шт	1 мл
	Гель для травления эмали	3 мл

00000025807	Паста прозрачная	1 мл
00000025840	Паста белая	1 мл
00000025841	Паста красная	1 мл
00000025842	Паста оранжевая	1 мл
00000025843	Паста жёлтая	1 мл
00000025844	Паста синяя	1 мл
00000025845	Паста зелёная	1 мл

РУ № ФСР 2010/07019 от 22.11.2017 г.

Стоматологические боры «РосБел»



КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО

стоматологических
материалов и инструментов

разработка

реализация

услуги

производство



32
ГОДА

на рынке



Профилактические материалы

viv
ВЛАДМИВА
vladmiva.ru

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Аэр-Клинз
БелСол №1
Белгель-Р
Колор-тест
Полидент

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ФИССУР

Фиссулайт
Фиссхим

СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Десенсил
Десенсил - Актив

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Белгель
Белгель-О
(вайт, лайт, актив)

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


Белгель-Са/Р
Глуфторэд
КолорДент
КолорДент-LC

ФТОРИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Белак-Ф
Белгель-Ф
Нанофлюор

СЕРЕБРЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

Аргенат
(одно/двухкомпонентный)

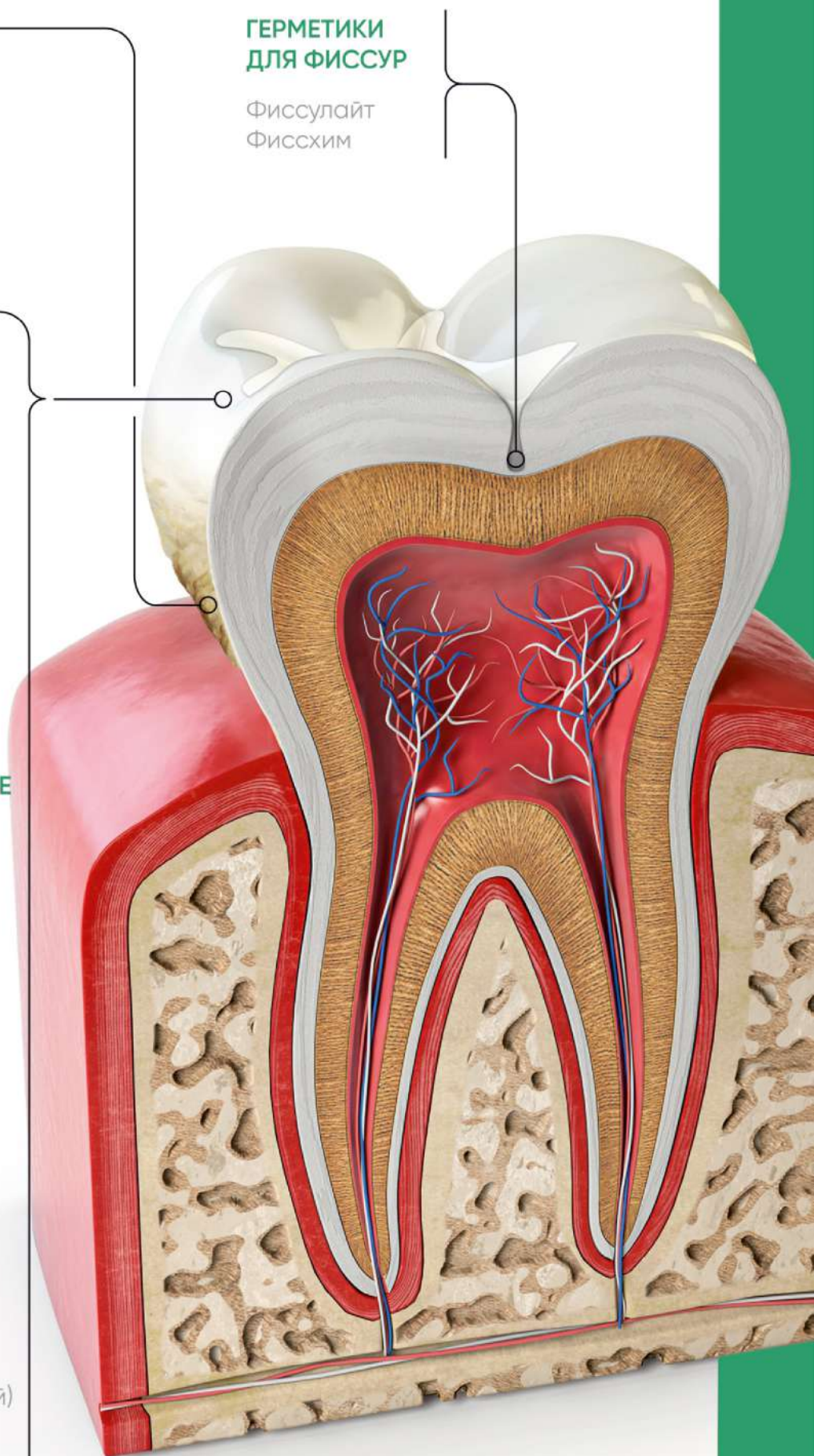



000 «Торговый Дом «ВладМиВа»
308023, Россия, Белгород, ул. Садовая, 118



тел./факс: +7(4722) 200-555



market@vladmiva.ru

наши филиалы:

309512, г. Старый Оскол
мк-н Ольминского, 6а
тел./факс: +7(4725) 33-39-33, 39-05-03
st_oskol@tdvladmiva.ru

302016, г. Орел
пер. Ботанический, 27
тел./факс: +7(4862) 72-54-60, 72-54-61
orel@tdvladmiva.ru

305029, г. Курск
ул. 1-я Пушкарная, 21
тел./факс: +7(4712) 227-446, 227-445
kursk@tdvladmiva.ru

140015, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Инициативная, 15
тел./факс: +7(495) 565-42-43, 565-42-44
ddvladmival@gmail.com

394036, г. Воронеж
ул. Чайковского, 8
тел./факс: +7(473) 202-10-45
voronezh@tdvladmiva.ru

241001, г. Брянск,
ул. Авиационная, 34
тел./факс: +7(4832) 59-54-46
bryansk@tdvladmiva.ru

300034, г. Тула,
ул. Демонстрации, 46
тел./факс: +7(4872) 70-13-20
tula@tdvladmiva.ru



Всю продукцию можно приобрести
в интернет магазине

tdvladmiva.ru